

AngelSounds JPD- 100S Mini Smart

Zařízení pro sledování srdečních ozev
plodu

Manuál

Představení produktu

AngelSounds JPD-100S+ je lehký a přenosný detektor pro poslech srdečních ozev plodu dítěte.

Připojený mobilní telefon může přes Bluetooth zobrazovat data a poskytovat další informace o plodu.

Pozn. Pro správnou funkčnost musí mít plod alespoň 16 týdnů. Užívání přístroje konzultujte s lékařem.

Obsah balení

AngelSounds JPD-100S Mini Smart, baterie, nahrávací kabel, headset, manuál.

Bezpečnostní upozornění


Vyhnete se používání zařízení v prostředí s potencionálním rizikem výbuchu, prostředí s vysokou či velmi nízkou teplotou nebo vlhkostí, v blízkosti otevřeného ohně. Doporučujeme zařízení nepoužívat ve venkovním prostředí.

Po ukončení sledování ze zařízení vždy setřete gel.


Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození!

Pokud zařízení čistíte, mějte jej vždy vypnuté.

Základy používání

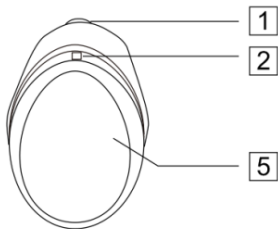

1. Zapnutí / vypnutí, úprava hlasitosti
2. Indikátor zapnutí
3. Konektor pro připojení sluchátek
4. Přenos signálu
5. Kryt baterie
6. Konektor pro audio signál

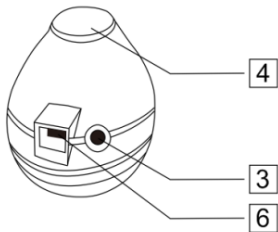

Zařízení zapnete otočením kolečka (1), zapnutí je indikováno rozsvícením diody. Postupným otáčením kolečka se přidává hlasitost, otočením na opačnou stranu se zvuk postupně snižuje až po úplné vypnutí zařízení.


Zařízení nabízí dva konektory. Konektor pro připojení

sluchátek a konektor pro audio signál. Ten můžete využít po připojení nahrávacího kabelu k zaznamenání zvuku srdečních ozev plodu. Pokud nepotřebujete zvuk nahrávat, stačí pro poslech připojit dodávaná sluchátka.

Baterie


Baterie je součástí balení. Je umístěna přímo v zařízení, ale není připojená. Před prvním použitím je nutné baterii připojit podle následujícího obrázku.

Sejměte kryt (5) a baterii připojte:

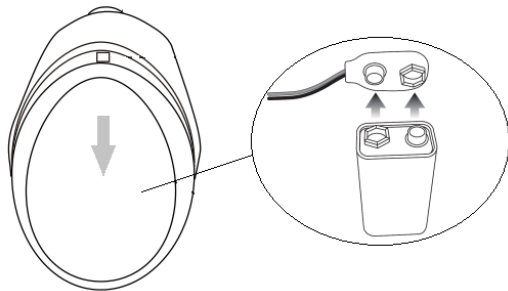

Postup nalezení srdce plodu

Naneste na místo pro přenosu signálu (4) trochu gelu a umístěte ji na břicho. Pomalu s ní pohybujte a snažte se nalézt srdce plodu. Po nalezení zvuku se sondou nadále pomalu pohybujte a hledejte místo, kde bude zvukový signál nejčistší.

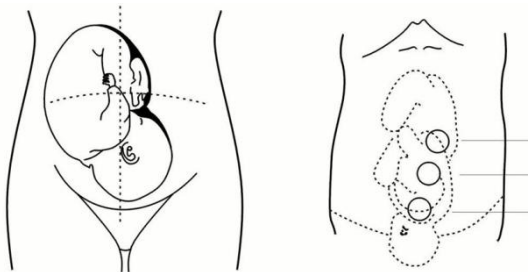

Obvyklou polohu plodu vidíte na následujícím obrázku. Poloha plodu se ale může lišit v závislosti na stupni těhotenství a dalších podmínkách.

Spočítejte počet ozev za minutu a získáte informaci o srdečním rytmu. Doporučujeme počítání zopakovat vícekrát.

Nahrávání zvuku

Při poslechu srdečních ozev můžete tyto zvuky také nahrávat. Stačí připojit nahrávací kabel do miniUSB konektoru, druhý konec zapojit do zařízení na kterém se bude zvuk nahrávat a spustit nahrávání. Můžete také spustit aplikaci AngelSounds, jakmile do telefonu připojíte druhý konec kabelu, automaticky se otevře okno pro nahrávání zvuku srdečních ozev plodu.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno) prohlašuje, že AngelSounds JPD 100S Mini Smart je ve shodě se základními požadavky směrnice 93/42/EEC.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.

AngelSounds JPD- 100S Mini Smart

Zariadenie na sledovanie srdcových
oziev plodu

Manuál

Predstavenie produktu

AngelSounds JPD-100S + je ľahký a prenosný detektor pre počúvanie srdcových oziev plodu dieťaťa.

Pripojený mobilný telefón môže cez Bluetooth zobrazovať dáta a poskytovať ďalšie informácie o plodu.

*Pozn. Pre správnu funkčnosť musí mať plod aspoň 16 týždňov.
Užívanie prístroja konzultujte s lekárom.*

Obsah balenia

AngelSounds JPD-100S Mini Smart, batérie, nahrávacie kábel, headset, manuál.

bezpečnostné upozornenie


Vyhňte sa používaniu zariadenia v prostredí s potencionálnym rizikom výbuchu, prostredie s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou alebo vlhkosťou, v blízkosti otvoreného ohňa. Odporúčame zariadenie nepoužívať vo vonkajšom prostredí.

Po ukončení sledovania zo zariadenia vždy zotrite gél.


Nepoužívajte zariadenie, ak javí známky poškodenia!

Ak zariadenie čistíte, majte ho vždy vypnuté.

Základy používania

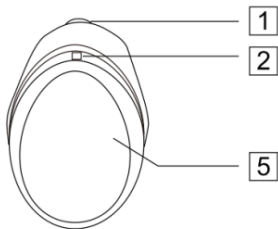

1. Zapnutie / vypnutie, úprava hlasitosti
2. Indikátor zapnutia
3. Konektor pre pripojenie slúchadiel
4. Prenos signálu
5. Kryt batérie
6. Konektor pre audio signál

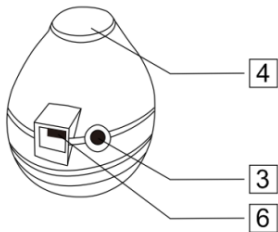

Zariadenie zapnete otočením kolieska (1), zapnutie je indikované rozsvietením diódy. Postupným otáčaním kolieska sa pridáva hlasitosť, otočením na opačnú stranu sa zvuk postupne znižuje až po úplné vypnutie zariadenia.

Zariadenie ponúka dva konektory. Konektor pre pripojenie slúchadiel a konektor pre audio signál. Ten môžete využiť


po pripojení nahrávacieho kábla k zaznamenaní zvuku srdcových oziev plodu.

Ak nepotrebuje zvuk nahrávať, stačí pre počúvanie pripojiť dodávané slúchadlá.

Batéria


Batéria je súčasťou balenia. Je umiestnená priamo v zariadení, ale nie je pripojená. Pred prvým použitím je nutné batériu pripojiť podľa nasledujúceho obrázku.

Odstraňte kryt (5) a batériu pripojte:

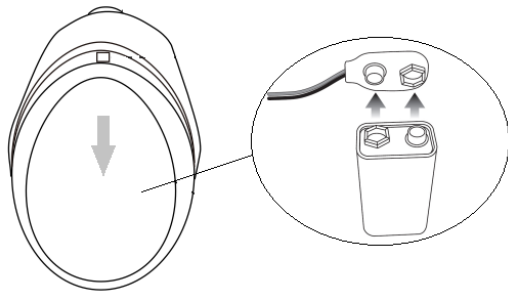

Postup nájdenie srdca plodu

Naneste na miesto pre prenosu signálu (4) trochu gélu a umiestnite ju na brucho. Pomaly s ňou pohybujte a snažte sa nájsť srdce plodu. Po nájdení zvuku so sondou naďalej pomaly pohybujte a hľadajte miesto, kde bude zvukový signál najčistejšie.

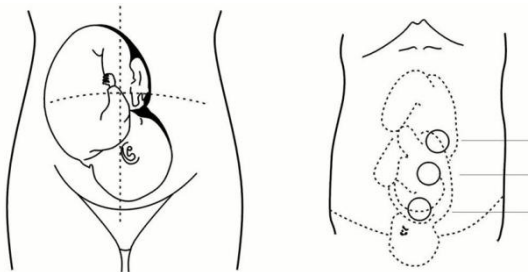

Obvyklou polohu plodu vidíte na nasledujúcom obrázku. Poloha plodu sa ale môže líšiť v závislosti na stupni tehotenstva a ďalších podmienkach.

Spočítajte počet oziev za minútu a získate informáciu o srdcovom rytme. Odporúčame počítanie zopakovať viackrát.

Nahrávanie zvuku

Pri počúvaní srdcových oziev môžete tieto zvuky tiež nahrávať. Stačí pripojiť nahrávacie kábel do miniUSB konektora, druhý koniec zapojiť do zariadenia na ktorom sa bude zvuk nahrávať a spustiť nahrávanie. Môžete tiež spustiť aplikáciu AngelSounds, ako náhle do telefónu pripojíte druhý koniec kábla, automaticky sa otvorí okno pre nahrávanie zvuku srdcových oziev plodu.

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že AngelSounds JPD 100S Mini Smart je v zhode so základnými požiadavkami smernice 93/42 / EEC.



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.

Tlačové chyby vyhradené.