
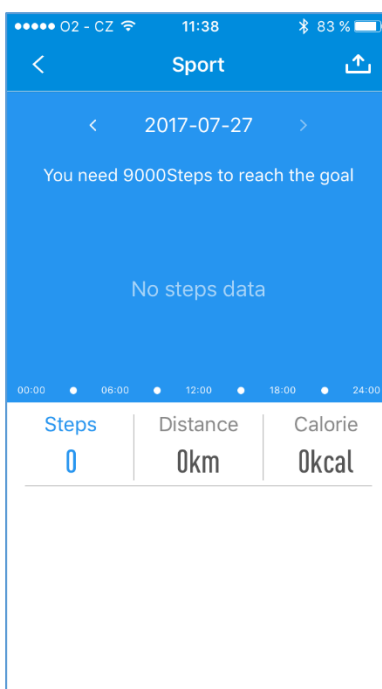


Popis aplikace H Band


Aplikace je rozdělena do tří základní oken, mezi kterými jednoduše přepínáte. Pro používání aplikace není nutné nastavovat přihlašovací údaje, ale lze ji používat i anonymním režimu (no account login). V tomto případě se ale data neukládají, nemáte jejich historii.

Dashboard

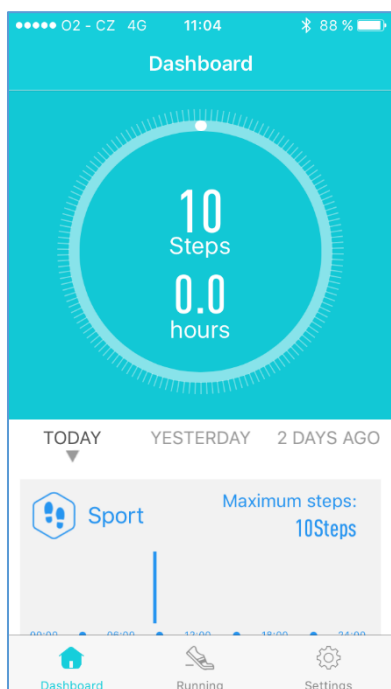



Základní obrazovka s informacemi o počtu kroků, době spánku, srdečním tepu, krevním tlaku. Pro podrobnější informaci stačí na daný graf klepnout prstem.

Hned pod první informací je možnost přepnout na údaje z předchozích dnů (Yesterday; 2 days ago).

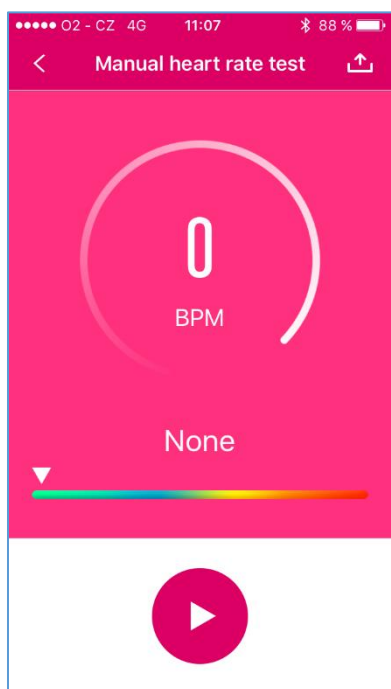


Ve spodní části této obrazovky jsou ikony, pomocí kterých spustíte měření na hodinkách přes aplikaci.

Running

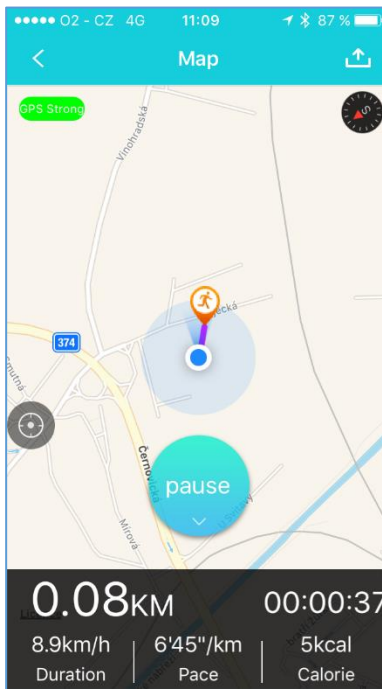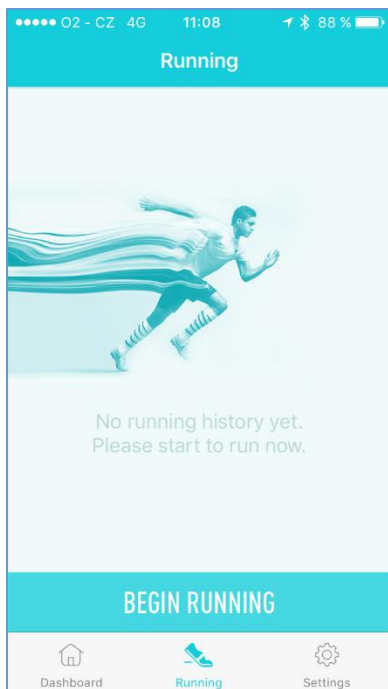

Pokud se s hodinkami rozhodnete běhat, tato část aplikace vám pomůže změřit čas, vzdálenost, rychlost, tempo a kalorie

Settings

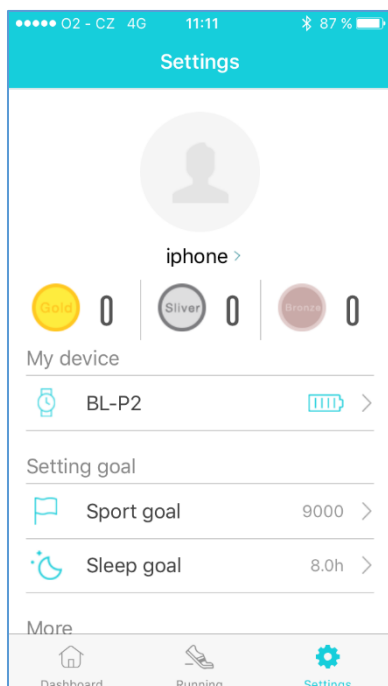


V záložce My device je informace o spárovaných hodinkách, popř. provedete první spárování. Klepněte na položku Device not connected a na další obrazovce uvidíte dostupná zařízení pro spárování. Klepněte na hodinky BL-P2 a zařízení je spárováno.

Dalšími položkami v Settings je nastavení cílů – počtu kroků (Sport goal) a délky spánku (Sleep goal).

o spárování nabízí záložka My device celou řadu dalších údajů, viz další strana.

Unit setting volí mezi zobrazováním hodnot (metrické vs. imperiální)

My device

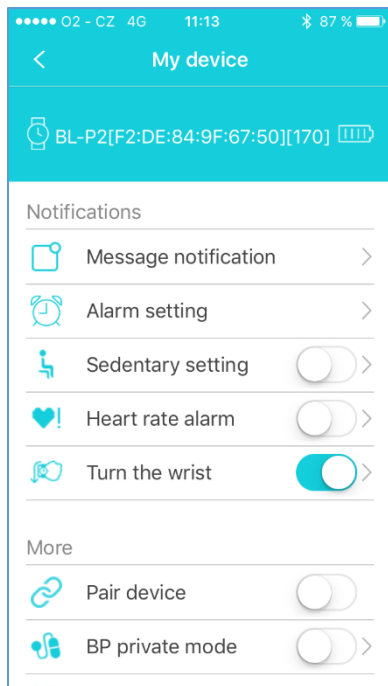

V Message notification můžete zapnout upozorňování hodinek na hovory (Phone call) a zprávy Message. Pokud hodnoty nejsou vybrány, upozorňování nebude fungovat! V Alarm setting lze nastavit budíky. Sedentary setting je upozornění na delší dobu neaktivity. Vyberte počáteční a koncový čas a dobu, po které se vám má v tomto období upozornit upozornění na chybějící pohyb. Heart rate alarm zajistí spuštění upozornění, pokud se hodnota srdečního tepu dostane přes nastavenou hodnotu. Turn the wrist zajistí, aby se displej hodinek rozsvítil při otočení zápěstí. Pair device umožňují automatické nahrávání dat do cloudu. BP private mode slouží pro určení vašeho obvyklého tlaku, aby hodinky při měření poskytovaly relevantnější informace. Pokud bude hodnota BP private mode zapnutá a tlak si bude měřit jiná osoba, hodnoty budou velmi nepřesné. Položka Switch setting slouží ke kontrole, zda jsou hodinky umístěny na ruce (Wear test) a zapnutí automatického měření

srdečního tepu (HR automatic monitoring). Take photo umožňuje při zatřesení zápěstí s hodinkami pořízením fotky mobilem. Reset password slouží k obnovení hesla (pokud jste přihlášení).